

Arianna orrszívó-porszívó

Használati útmutató

Elvi ismertetés: A nátha a gyermekek igen gyakori betegsége. Ilyenkor a legnagyobb gond az, hogy a csecsemő és a kisgyermek képtelen kifújni az orrát. Időbe telik, míg a csecsemő megtanul szájon át lélegezni. Mivel a felgyülemlett váladék kijönni nem tud, ezért a visszacsorgó váladék fül-, és arcüreggyulladást, valamint hörgő- és tüdőgyulladást okozhat. Igen fontos tehát a pangó orrváladék rendszeres eltávolítása, az orrjáratok szabadabbá tétele. Az Arianna orrszívó-porszívó kiválóan alkalmas erre a célra. Természetesen az orvosi vizsgálat nem mellőzhető: az elhúzódó, gennyes orrfolyás okát orvosnak kell megállapítania. A váladékszívás a szakorvosi kezelés kiegészítését, a légzés javítását, valamint a nátha szövődményeinek megelőzését szolgálja. /A hemofiliás betegek konzultáljanak az orvosukkal./



Az orrszívó használata:

Az A jelű szívófej zárja el teljesen az egyik oldali orrfejet.

A készülék a szíváserősséget önmaga szabályozza!

A szívás kb. néhány másodperc megszakításokkal történjék mindaddig, míg a váladék ürül. A szívófej az orrbemenethez illeszve le-, fel- és oldal felé is mozgatható.


A szívás naponta többször megismételhető a nátha gyógyulásáig.

A fertőtlenítés módja:

Az eszközök (az A jelű szívófejek) kifőzése.

Mosás: antibakteriális folyékony szappannal vagy mosogatószerrel.

Fertőtlenítőszerben ne áztassák!

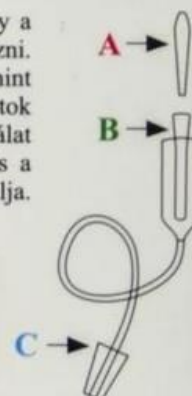

Összeszerelés:

1. Az A jelű szívófejet bedugjuk a B-vel jelölt részbe.
2. Bekapcsoljuk a porszívót.
3. A porszívó gégecsővébe behelyezzük a C-vel jelölt részt.

Szét szerelés:

A működő porszívóból kihúzzuk a C-vel jelölt alkatrészt, majd kikapcsoljuk a porszívót.



Népszerűsítő videó:

<https://www.youtube.com/watch?v=mOPIIXqH4f8&t=1s>

