

Digitális Cumis lázmérő

Minden esetben olvassa el a használati útmutatót.

Biztonságos, könnyen leolvasható, gyors és pontos műszer, amelyet a babák hőmérsékletének mérésére terveztek.

A lázmérő belső testhőmérsékletet 3 **perc** után mutatja. A lázmérő csak emberi test testhőmérsékletére alkalmas. A termék apró részeket tartalmaz, elemek, stb.

Használata:

Kapcsolja be úgy a lázmérőt, hogy a rajta található gombot megnyomja.

Zenés hangjelzés jelzi 3 perc után a kijelzőn automatikusan megjelenő pontos hőmérsékletet.

A cumis lázmérő csak gyermekeknél alkalmazható!

A cumis lázmérőt kizárólag szájon történő hőmérsékletmérésre használja.

Amennyiben a készüléket ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a ki/be kapcsolót rövid ideig

Szájon: Abban az esetben, ha a szájon keresztül méri a testhőmérsékletet, az orron kell beszívni a levegőt, hogy a lázmérő mérési fokát a légáram ne befolyásolja. Orrán lassan vegye a levegőt!

Tisztítás: Használjon alkohollal nedvesített ruhát a letörléséhez, vagy mossa meg hideg vízzel.

Kijelző: LCD kijelző

Tárolás: 10 °C – 50 °C

Forgalmazza: Ladotex Kft. 1132 Budapest, Visegrádi u. 25.

Biztonsági figyelmeztetés: Gyermekeit soha ne hagyja őrizetlenül! A terméket csak rendeltetésszerűen használja! Amennyiben a termék megsérült, ne használja!

Figyelmeztetések: A csomagolást tartsa távol gyermekétől, ne adja gyermeke kezébe. Az apró részek lenyelése fulladást okozhat! Az elemet ne tegye ki hőnek, ne tegye tűzbe, csak rendeltetésszerűen használja! A hőmérőt ne tegye forró vízbe! Ne tegye ki a hőmérőt erős Napsütésnek! Ne ejtse le és ne dobálja! Ne próbálja megszerelni, szétszedni! Ne tegye oldószerbe / vegyszerbe forró vízbe! Ne tegye ki magas hőmérsékletnek! Miután az elem lemerült, csak a megfelelő szelektív tárolóba dobja el, vagy adja le!

Forgalmazó: Ladotex Kft., 1132 Budapest, Visegárdi u. 25.

EAN: 4013283096338