

Füldugó:

Használat előtt ellenőrizzük, hogy sérülésmentes-e a füldugó.

Ajánlott kezünk és a füldugó tisztán tartása.

1. Az egyik kezével húzza fel a fülcimpáját, hogy a hallójárat elérhetővé váljon.
2. A másik kezével helyezze a füldugót a hallójáratába a peremes végével.
3. Lágú csavaró mozdulattal óvatosan nyomja be a füldugót, míg a hallójáratot teljesen el nem zárta.
4. Győződjön meg róla, hogy a füldugót helyesen tette be fülébe; tegye tenyerét a fülére, majd vegye le, ha nem érez jelentős különbséget, akkor megfelelően helyezte be a füldugót.

Tárolás száraz, hűvös helyen. Gyermekektől 3 éves kor alatt elzárva tartandó.

Tisztítás szappanos meleg vízzel.